


固美尔
— Gumier —

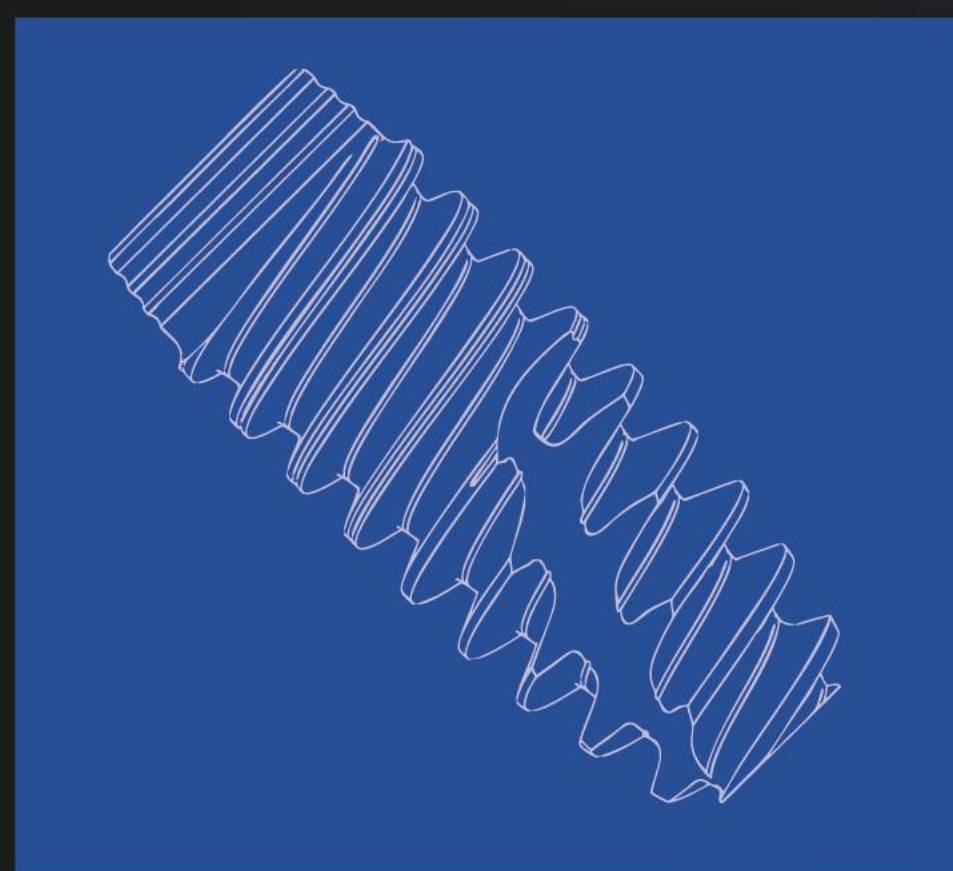

Dental Implant System
牙种植体系统




Dental Implant System
牙种植体系统



D-SLA纯净钛表面技术 重新定义骨结合

- 更纯净: 100%纯净钛表面, 生物相容性至极
- 更安全: 球形喷砂+16道洁净, 从源头杜绝污染
- 更强大: 微观结构升级, 实现更快更强的骨结合

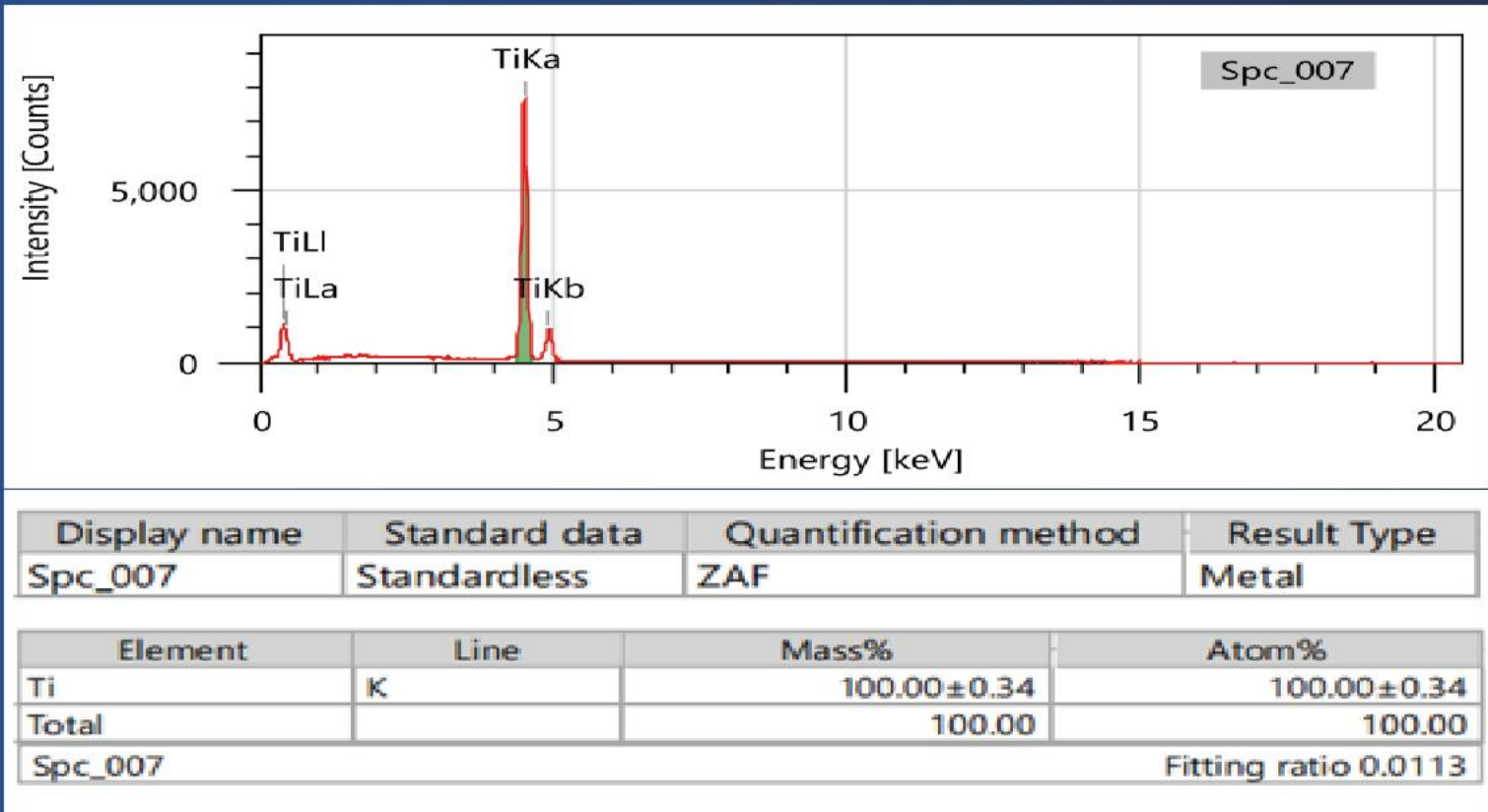

始于纯净, 成于结合

植体设计特点

匠心设计 稳捷合一

- 1 仿生锥形设计:咬合力均匀分散,有效减少骨吸收
- 2 双螺纹设计:有效缩短植入时间,提高植入效率
- 3 莫氏锥度连接:内六角莫氏锥度连接,隔绝细菌微渗漏,载荷传递
- 4 平台化统一接口:配件通用性强,极大简化临床操作



高强度植体材料
冷作钛工艺,材料强度较常规种植体提升约30%,长期稳定




原厂精密配件系统
超低间隙钛合金制造,精密咬合,有效防范微动磨损与机械故障

卓越材料·持久可靠



无接触式包装 锁住纯净,一步到位

- ☑ 源头洁净:生产至包装全程无接触,杜绝污染及杂质
- ☑ 过程安全:内固定设计,杜绝储运过程中的摩擦与震荡
- ☑ 术中高效:一体化快速拆卸设计,转移更快捷

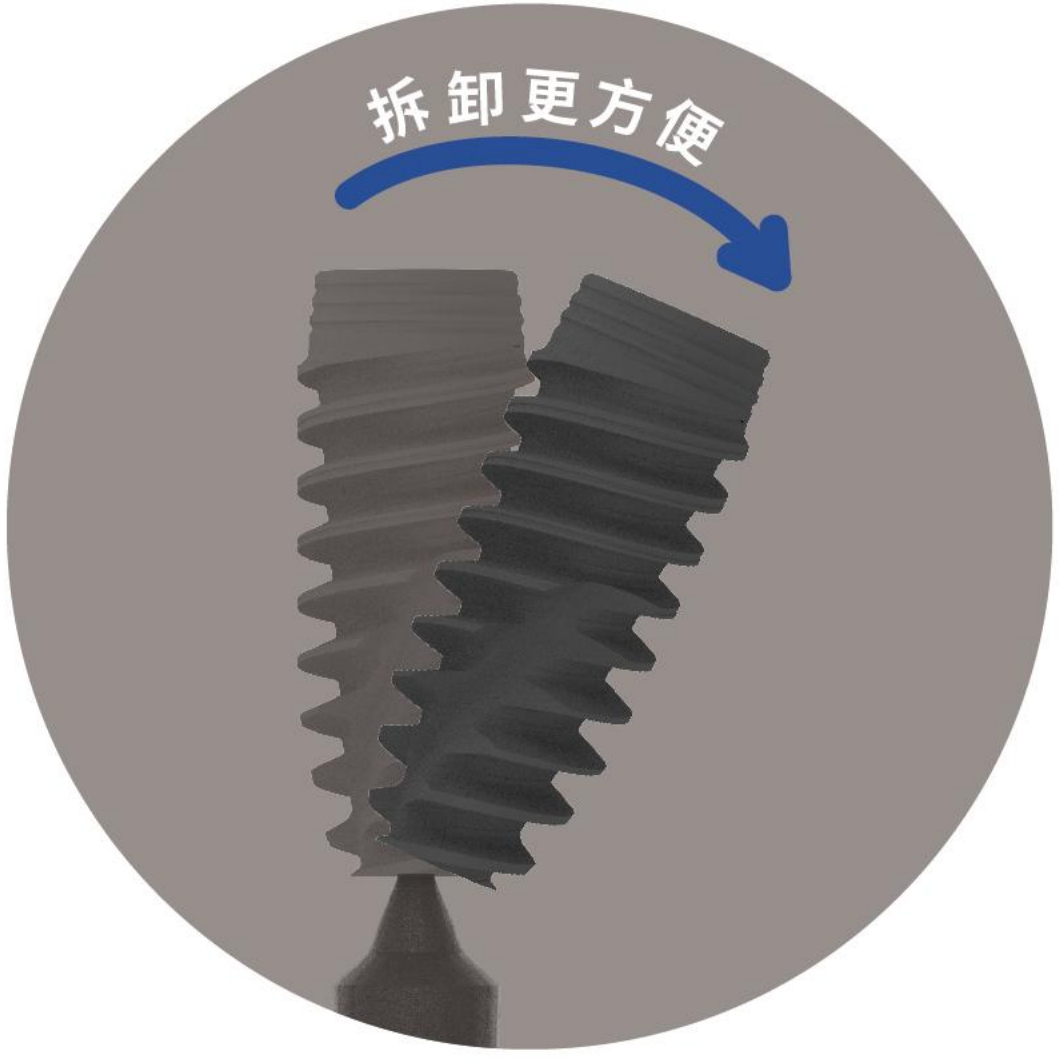


种植体




- 包装单位:种植体*1个,覆盖螺丝(H:0.4mm)*1个
- 种植体材料:高端进口冷作钛
- 覆盖螺丝材料:低间隙钛合金
- 如需要其他型号的覆盖螺丝,可单独采购
- 植体建议植入扭力:≤45N.cm
- 覆盖螺丝建议手动旋紧即可(5-10N.cm)


直径: 3.5mm 平台: 常规	
编码	长度/mm
K301100021-001	8.5
K301100021-002	10
K301100021-003	11.5
K301100021-004	13
K301100021-005	15

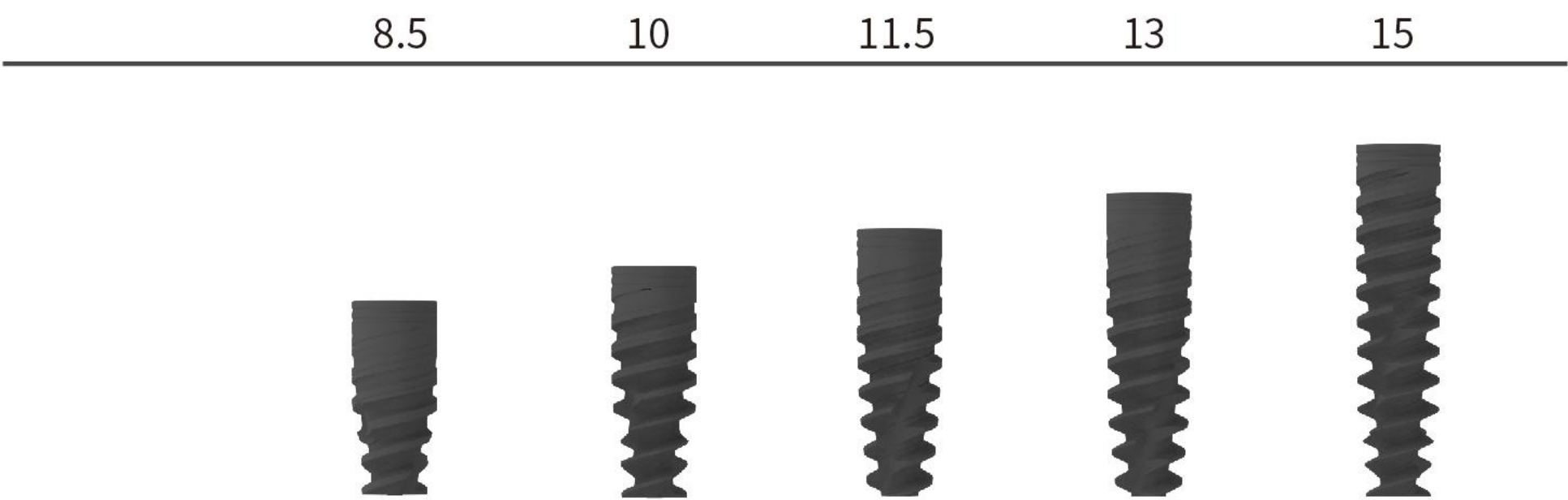

直径: 4.3mm 平台: 常规	
编码	长度/mm
K301100022-001	7.0
K301100022-002	8.5
K301100022-003	10
K301100022-004	11.5
K301100022-005	13
K301100022-006	15

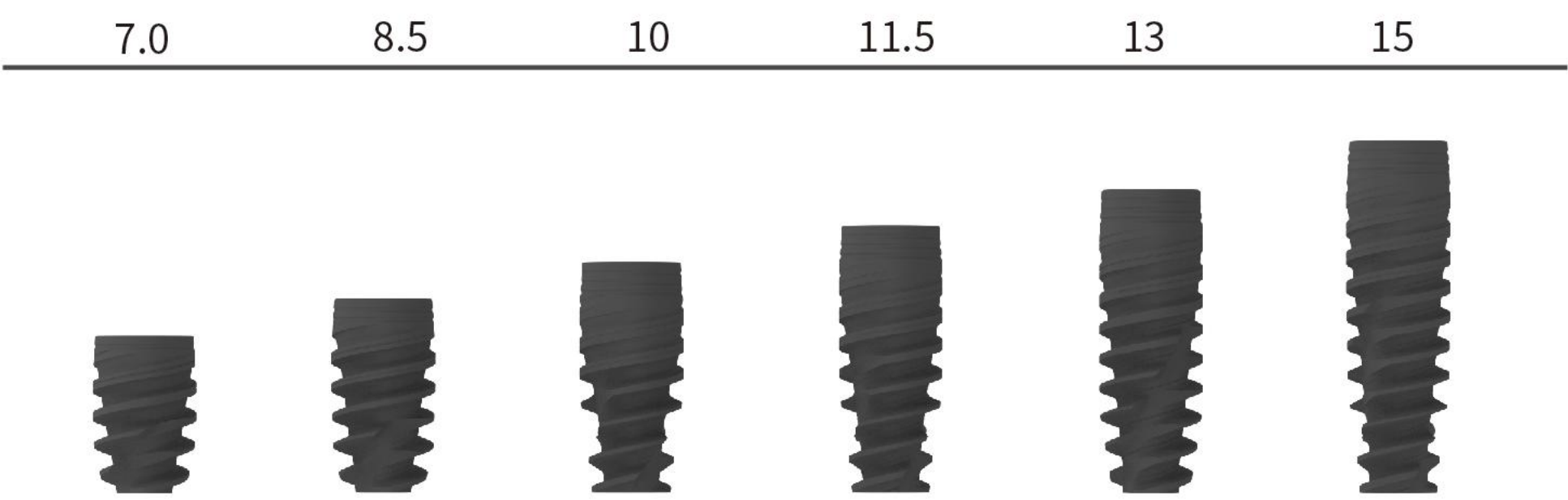


直径: 5.0mm 平台: 常规	
编码	长度/mm
K301100022-007	7.0
K301100022-008	8.5
K301100022-009	10
K301100022-0010	11.5
K301100022-0011	13

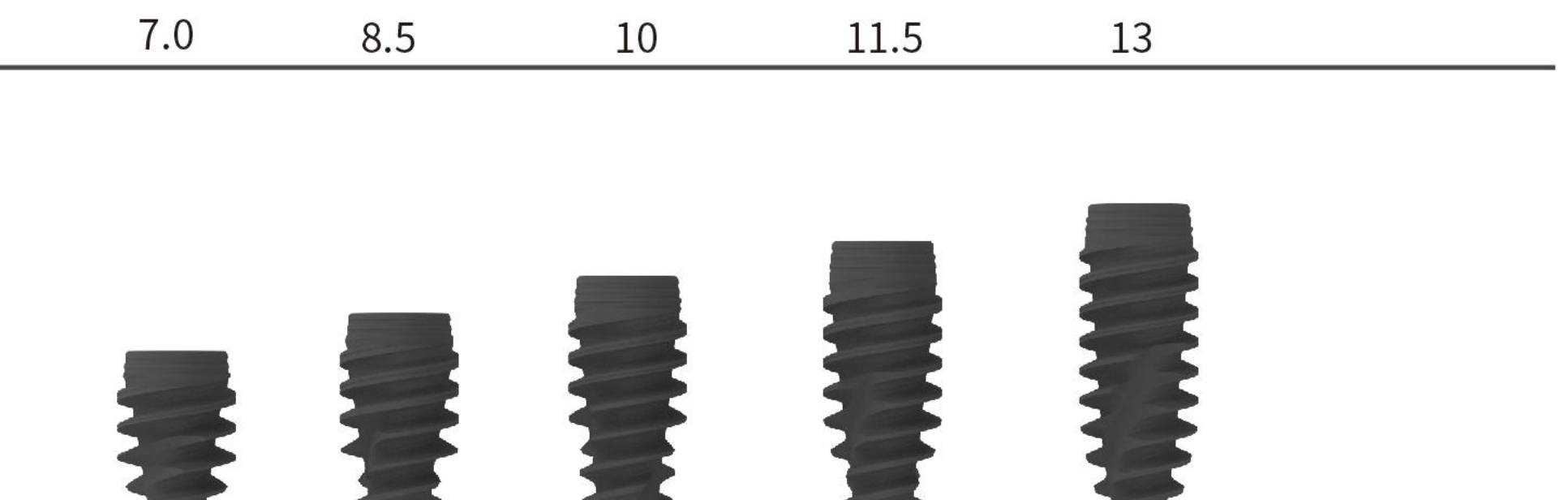


修复配件

修复程序 I (标准种植修复)

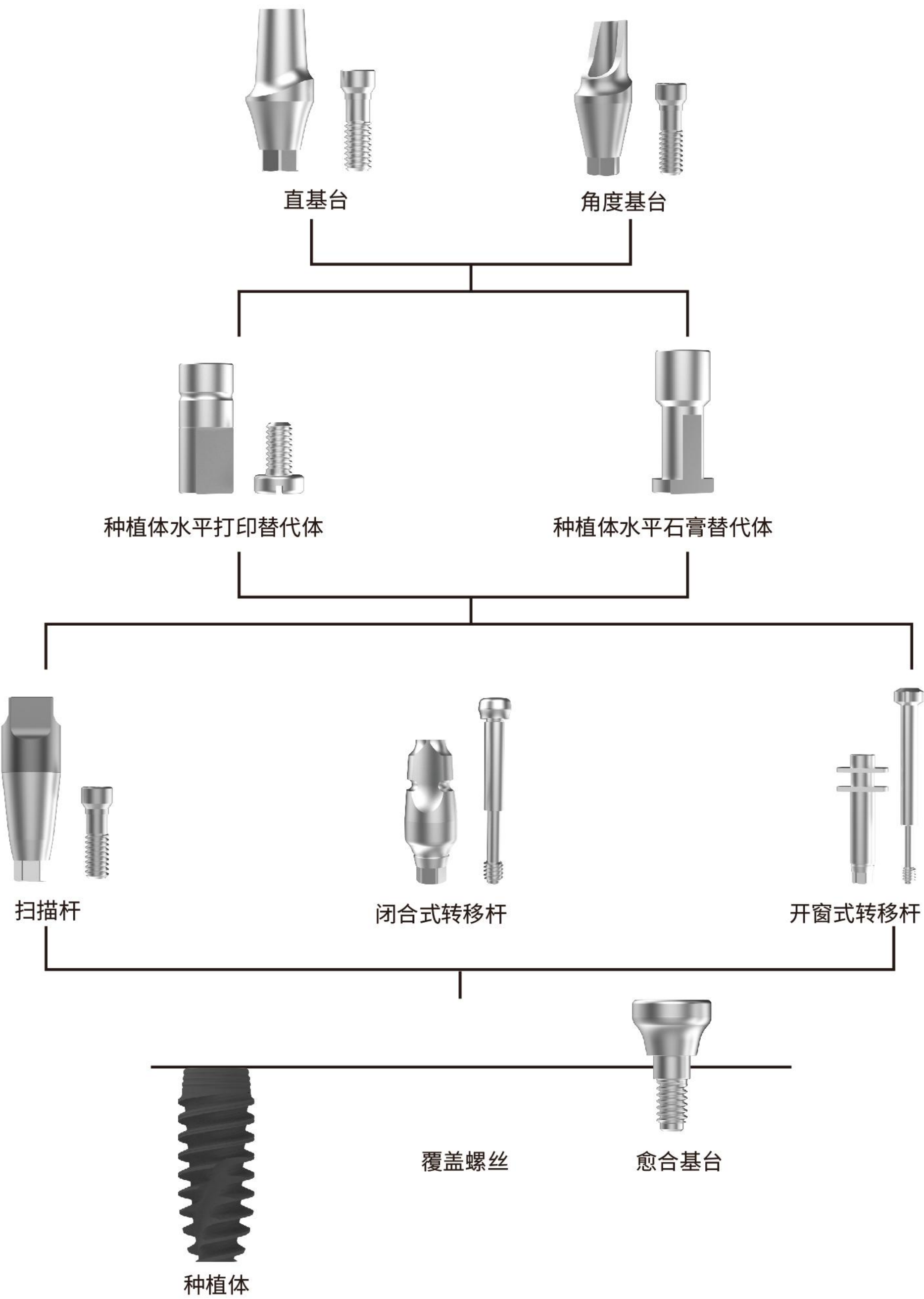


愈合基台

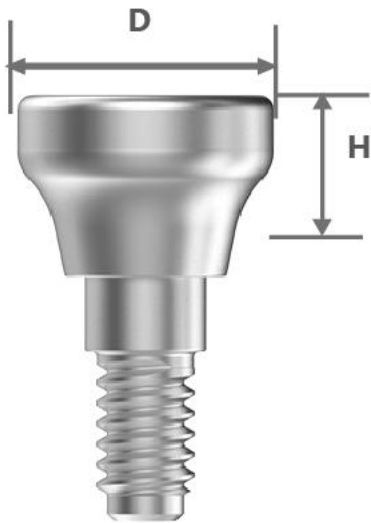

编码	产品描述	直径 D(mm)	高度 H(mm)
K301201021-001	愈合基台-标准型AC-NP-Φ3.6-GH3.0	3.6	3.0
K301201021-002	愈合基台-标准型AC-NP-Φ3.6-GH5.0	3.6	5.0
K301201021-003	愈合基台-标准型AC-NP-Φ3.6-GH7.0	3.6	7.0
K301201021-004	愈合基台-标准型AC-NP-Φ5.0-GH3.0	5.0	3.0
K301201021-005	愈合基台-标准型AC-NP-Φ5.0-GH5.0	5.0	5.0
K301201021-006	愈合基台-标准型AC-NP-Φ5.0-GH7.0	5.0	7.0
K301201022-001	愈合基台-标准型AC-RP-Φ3.6-GH3.0	3.6	3.0
K301201022-002	愈合基台-标准型AC-RP-Φ3.6-GH5.0	3.6	5.0
K301201022-003	愈合基台-标准型AC-RP-Φ3.6-GH7.0	3.6	7.0
K301201022-004	愈合基台-标准型AC-RP-Φ5.0-GH3.0	5.0	3.0
K301201022-005	愈合基台-标准型AC-RP-Φ5.0-GH5.0	5.0	5.0
K301201022-006	愈合基台-标准型AC-RP-Φ5.0-GH7.0	5.0	7.0
K301201022-007	愈合基台-标准型AC-RP-Φ6.0-GH3.0	6.0	3.0
K301201022-008	愈合基台-标准型AC-RP-Φ6.0-GH5.0	6.0	5.0
K301201022-009	愈合基台-标准型AC-RP-Φ6.0-GH7.0	6.0	7.0

- 包装单位：1*愈合基台
- 材料：医用钛合金
- 在软组织愈合时，形成穿龈轮廓
- 根据直径和穿龈高度选择
- 使用T5星型螺丝刀拧紧
- 建议拧紧扭矩：8~10 N.cm


直基台

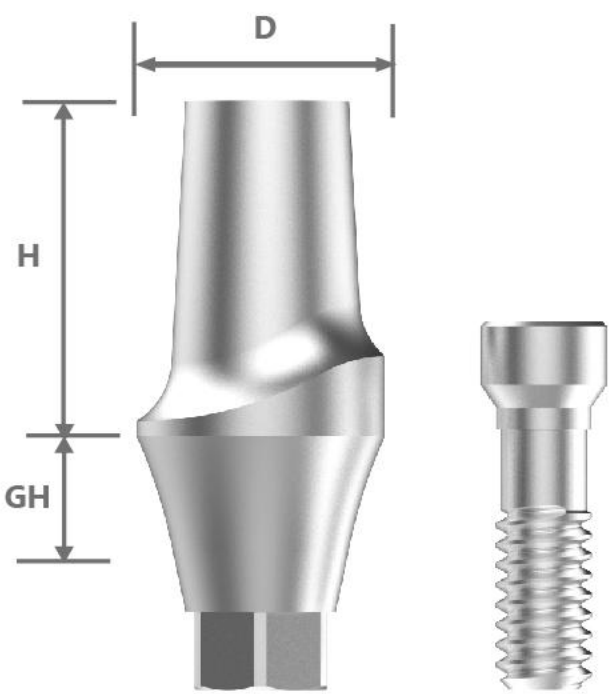

编码	产品描述	直径 D(mm)	穿龈高度 GH(mm)
K301202021-001	直基台AC-NP-Φ4.8-GH1.5-抗旋	4.8	1.5
K301202021-002	直基台AC-NP-Φ4.8-GH3.0-抗旋	4.8	3.0
K301202021-003	直基台AC-NP-Φ4.8-GH4.5-抗旋	4.8	4.5
K301202021-005	直基台AC-NP-Φ5.0-GH1.5-抗旋	5.0	1.5
K301202022-001	直基台AC-RP-Φ5.0-GH1.5-抗旋	5.0	1.5
K301202022-002	直基台AC-RP-Φ5.0-GH3.0-抗旋	5.0	3.0
K301202022-003	直基台AC-RP-Φ5.0-GH4.5-抗旋	5.0	4.5
K301202022-004	直基台AC-RP-Φ6.0-GH1.5-抗旋	6.0	1.5

- 包装单位：1*直基台，1*中央螺丝
- 材料：医用钛合金
- 永久性修复用，可做粘接固位或螺丝固位
- 与中央螺丝配套使用，根据直径和穿龈高度选择
- 使用T5星型螺丝刀配合扭力扳手拧紧
- 建议拧紧扭矩：25~30 N.cm
- 适用于植体水平取模案例


基底基台

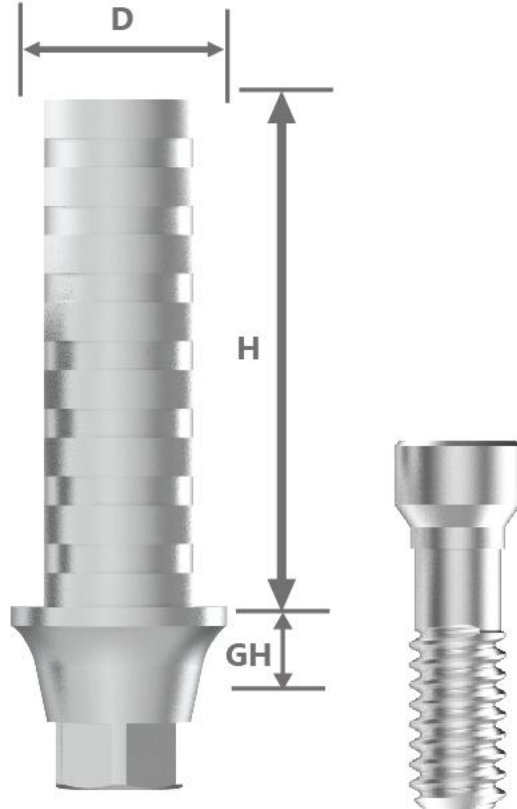

编码	产品描述	直径 D(mm)	穿龈高度 GH(mm)	修复高度 H(mm)
K301202021-004	基底基台AC-NP-Φ4.0-GH1.5-抗旋	4.0	1.5	10.5
K301202022-005	基底基台AC-RP-Φ4.5-GH1.5-抗旋	4.5	1.5	10.5

- 包装单位：1*直基台，1*中央螺丝
- 材料：医用钛合金
- 永久性修复用，可做粘接固位或螺丝固位
- 与中央螺丝配套使用，根据直径和穿龈高度选择
- 使用T5星型螺丝刀配合扭力扳手拧紧
- 建议拧紧扭矩：25~30 N.cm
- 适用于植体水平取模案例


角度基台

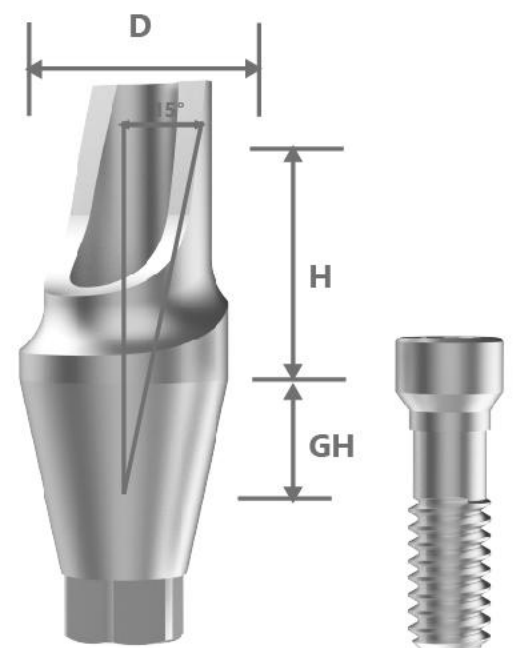

编码	产品描述	角度 A(°)	直径 D(mm)	穿龈高度 GH(mm)
K301203021-001	角度基台AC-NP-Φ4.8-GH1.5-15度-抗旋	15	4.8	1.5
K301203021-002	角度基台AC-NP-Φ4.8-GH3.0-15度-抗旋	15	4.8	3.0
K301203021-003	角度基台AC-NP-Φ4.8-GH4.5-15度-抗旋	15	4.8	4.5
K301203022-001	角度基台AC-RP-Φ5.0-GH1.5-15度-抗旋	15	5.0	1.5
K301203022-002	角度基台AC-RP-Φ5.0-GH3.0-15度-抗旋	15	5.0	3.0
K301203022-003	角度基台AC-RP-Φ5.0-GH4.5-15度-抗旋	15	5.0	4.5

- 包装单位：1*角度基台，1*中央螺丝
- 材料：医用钛合金
- 抗旋接口，六个可调整方向
- 永久性修复用，可做粘接固位或螺丝固位
- 与中央螺丝配套使用
- 根据直径和穿龈高度选择
- 使用T5星型螺丝刀配合扭力扳手拧紧
- 建议拧紧扭矩：25~30 N.cm
- 适用于植体水平取模案例


种植体水平闭合式转移杆

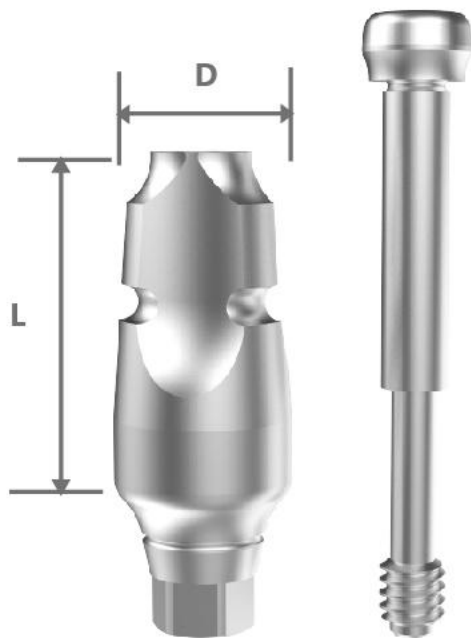

编码	产品描述	直径 D(mm)	高度 L(mm)
K301302021-001	种植体水平闭合式转移杆AC-NP-D36L13-抗旋	3.6	13.0
K301302021-002	种植体水平闭合式转移杆AC-NP-D50L13-抗旋	5.0	12.0
K301302022-001	种植体水平闭合式转移杆AC-RP-D36L9-抗旋	3.6	9.0
K301302022-002	种植体水平闭合式转移杆AC-RP-D36L13-抗旋	3.6	13.0
K301302022-003	种植体水平闭合式转移杆AC-RP-D50L9-抗旋	5.0	9.0
K301302022-004	种植体水平闭合式转移杆AC-RP-D50L13-抗旋	5.0	13.0
K301302022-005	种植体水平闭合式转移杆AC-RP-D60L9-抗旋	6.0	9.0
K301302022-006	种植体水平闭合式转移杆AC-RP-D60L13-抗旋	6.0	13.0

- 包装单位: 1 *闭合式转移杆 + 1 *转移杆螺丝
- 材料: 医用钛合金
- 抗旋, 植体水平闭合式托盘取模用
- 搭配转移杆螺丝使用
- 使用T5星型螺丝刀, 手动拧紧即可


种植体水平开窗式转移杆

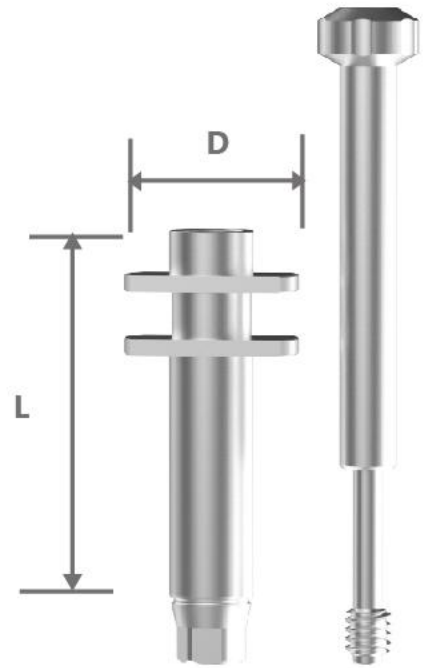

编码	产品描述	直径 D(mm)	高度 L(mm)
K301301021-001	种植体水平开窗式转移杆AC-NP-D36L10-抗旋	3.6	10.0
K301301021-002	种植体水平开窗式转移杆AC-NP-D36L14-抗旋	3.6	14.0
K301301021-003	种植体水平开窗式转移杆AC-NP-D50L10-抗旋	5.0	10.0
K301301021-004	种植体水平开窗式转移杆AC-NP-D50L14-抗旋	5.0	14.0
K301301022-001	种植体水平开窗式转移杆AC-RP-D36L10-抗旋	3.6	10.0
K301301022-002	种植体水平开窗式转移杆AC-RP-D36L14-抗旋	3.6	14.0
K301301022-003	种植体水平开窗式转移杆AC-RP-D50L10-抗旋	5.0	10.0
K301301022-004	种植体水平开窗式转移杆AC-RP-D50L14-抗旋	5.0	14.0
K301301022-005	种植体水平开窗式转移杆AC-RP-D60L10-抗旋	6.0	10.0
K301301022-006	种植体水平开窗式转移杆AC-RP-D60L14-抗旋	6.0	14.0

- 包装单位: 1 *开窗式转移杆 + 1 *转移杆螺丝
- 材料: 医用钛合金
- 抗旋, 植体水平开窗式托盘取模用
- 搭配转移杆螺丝使用
- 使用T5星型螺丝刀, 手动拧紧即可


种植体水平扫描杆

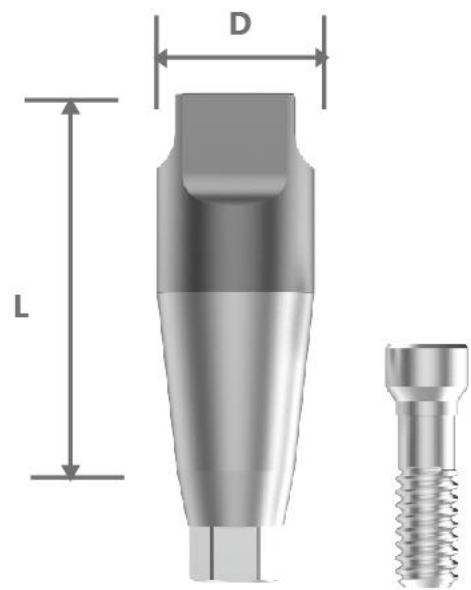

编码	产品描述	直径 D(mm)	高度 L(mm)
K301404021-001	种植体水平扫描杆AT-NP-3.5-D4-L10	4.0	10.0
K301404022-001	种植体水平扫描杆RP-D4.5-L10	4.5	10.0
K301404021-002	种植体水平扫描杆AT-NP-3.5-D4-L15	4.0	15.0
K301404022-002	种植体水平扫描杆RP-D4.5-L15	4.5	15.0

- 包装单位: 1 *植体水平扫描杆, 1*中央螺丝
- 材料: 医用钛合金
- 抗旋, 植体水平口扫用
- 搭配中央螺丝使用
- 口扫时, 扫描模式选择种植模式
- 使用口扫, 需配套使用数字化替代体
- 使用T5星型螺丝刀, 手动拧紧即可


植体水平石膏替代体

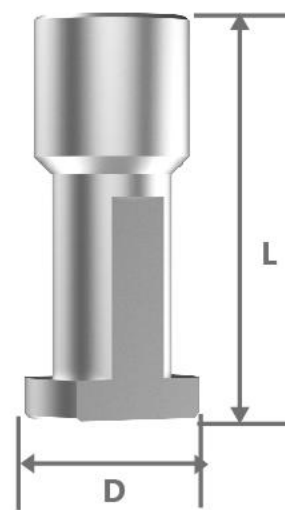

编码	产品描述	直径 D(mm)	高度 L(mm)
K301601021-001	种植体水平石膏替代体AT-NP	3.5	10.0
K301601022-001	种植体水平石膏替代体AT-RP	3.5	10.0

- 包装单位: 1 *替代体
- 材料: 医用钛合金/医用不锈钢
- 传统石膏倒模用, 将口内的种植体重现在石膏技工模型上
- 植体水平取模通用款

植体水平打印替代体

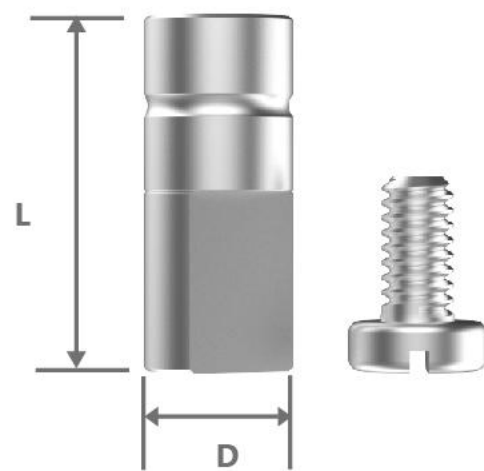


编码	产品描述	直径 D(mm)	高度 L(mm)
K301602021-001	种植体水平打印替代体AT-NP	3.5	8.0
K301602022-001	种植体水平打印替代体AT-RP	4.0	9.5


- 包装单位: 1 *替代体, 1*替代体底部螺丝
- 材料: 医用钛合金/医用不锈钢
- 口扫打印模型用, 将口内的种植体重现在树脂技工模型上
- 植体水平取模、口扫通用款

修复配件

修复程序 II（桥架类修复）

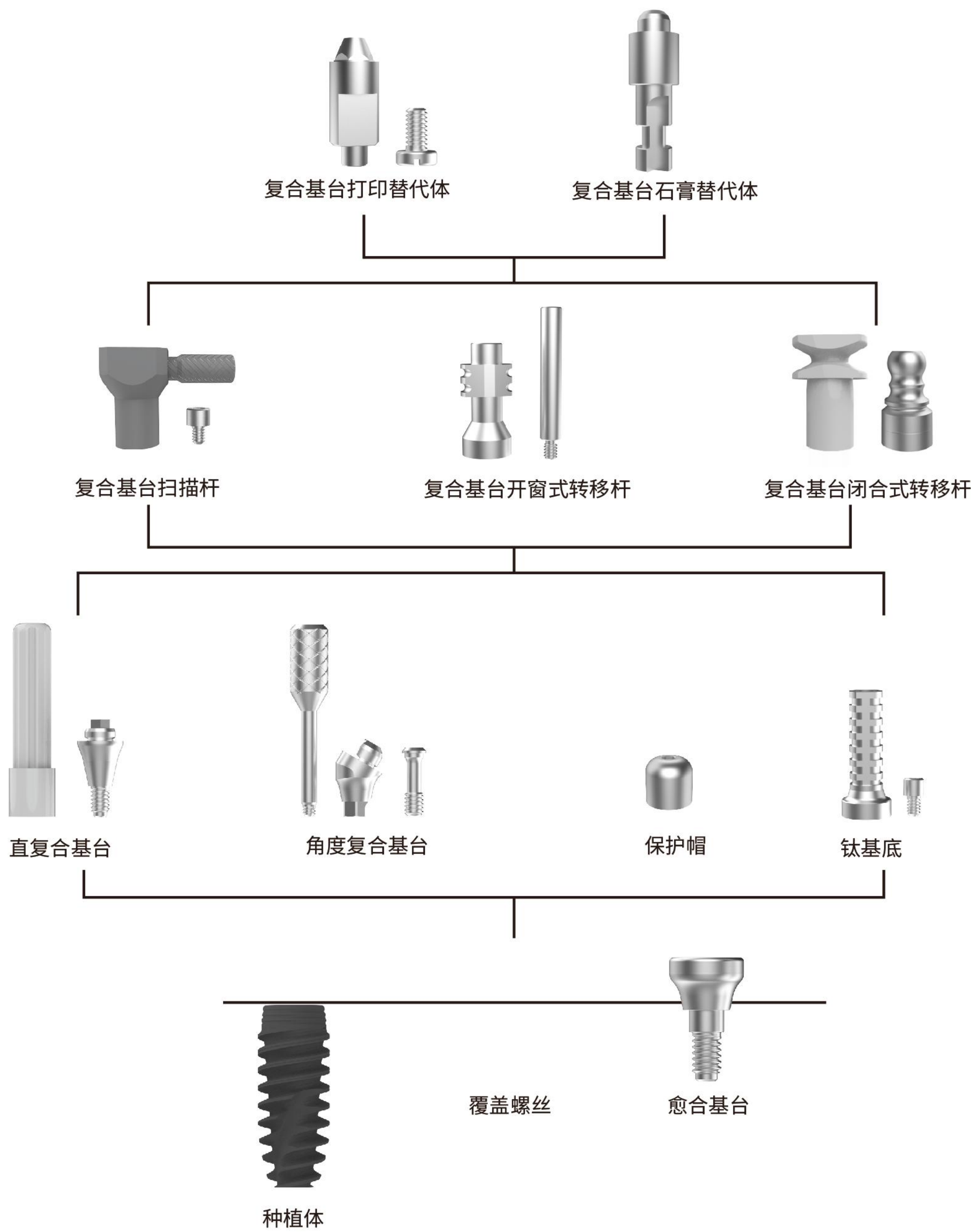


直复合基台

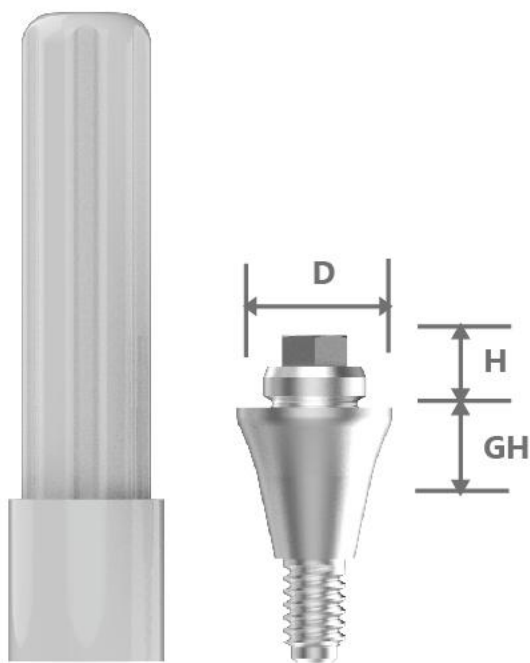

编码	产品描述	直径 D(mm)	穿龈高度 GH(mm)	修复高度 H(mm)
K301204021-001	直复合基台AC-NP-Φ4.8-GH1.5	4.8	1.5	2.2
K301204021-002	直复合基台AC-NP-Φ4.8-GH2.5	4.8	2.5	2.2
K301204021-004	直复合基台AC-NP-Φ4.8-GH4.5	4.8	4.5	2.2
K301204021-010	直复合基台AC-NP-Φ4.8-GH1.5 (加强型)	4.8	1.5	2.2
K301204021-011	直复合基台AC-NP-Φ4.8-GH2.5 (加强型)	4.8	2.5	2.2
K301204021-012	直复合基台AC-NP-Φ4.8-GH3.5 (加强型)	4.8	3.5	2.2
K301204021-013	直复合基台AC-NP-Φ4.8-GH4.5 (加强型)	4.8	4.5	2.2
K301204022-001	直复合基台AC-RP-Φ4.8-GH1.5	4.8	1.5	2.2
K301204022-002	直复合基台AC-RP-Φ4.8-GH2.5	4.8	2	2.2
K301204022-004	直复合基台AC-RP-Φ4.8-GH4.5	4.8	4.5	2.2
K301204022-005	直复合基台AC-RP-Φ4.8-GH1.5 (加强型)	4.8	1.5	2.2
K301204022-006	直复合基台AC-RP-Φ4.8-GH2.5 (加强型)	4.8	2.5	2.2
K301204022-007	直复合基台AC-RP-Φ4.8-GH3.5 (加强型)	4.8	3.5	2.2
K301204022-008	直复合基台AC-RP-Φ4.8-GH4.5 (加强型)	4.8	4.5	2.2

- 包装单位：1*直复合基台，1*辅助手柄
- 材料：医用钛合金
- 螺丝与基台一体型
- 矫正就位道，桥架修复用
- 如果采用数字化预设方式修复，可提供对应的基台数据库
- 使用套筒扳手，与扭力扳手或者手机配合拧紧
- 建议拧紧扭矩：25~30 N.cm
- 基台水平取模


角度复合基台

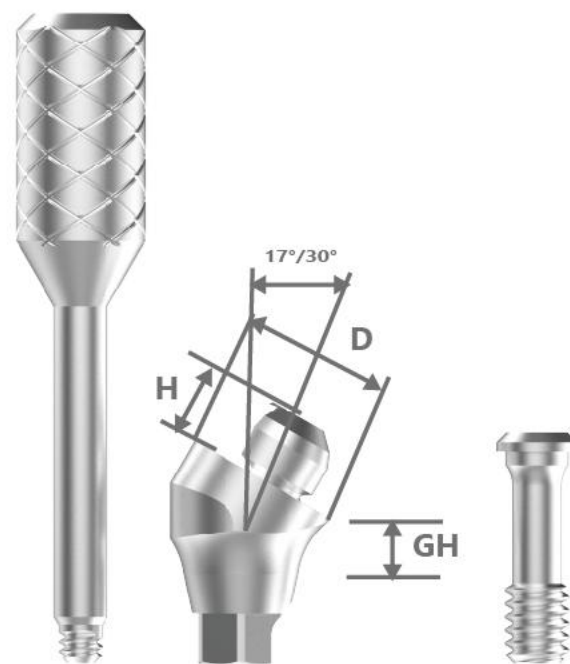

编码	产品描述	角度 A(°)	直径 D(mm)	穿龈高度 GH(mm)	修复高度 H(mm)
K301205021-011	角度复合基台AC-NP-Φ4.8-GH2.5-17度-抗旋(加强型)	17	4.8	2.5	2.2
K301205021-012	角度复合基台AC-NP-Φ4.8-GH3.5-17度-抗旋(加强型)	17	4.8	3.5	2.2
K301205021-013	角度复合基台AC-NP-Φ4.8-GH3.5-30度-抗旋(加强型)	30	4.8	3.5	2.2
K301205021-014	角度复合基台AC-NP-Φ4.8-GH4.5-30度-抗旋(加强型)	30	4.8	4.5	2.2
K301205022-006	角度复合基台AC-RP-Φ4.8-GH2.5-17度-抗旋(加强型)	17	4.8	2.5	2.2
K301205022-007	角度复合基台AC-RP-Φ4.8-GH3.5-17度-抗旋(加强型)	17	4.8	3.5	2.2
K301205022-008	角度复合基台AC-RP-Φ4.8-GH3.5-30度-抗旋(加强型)	30	4.8	3.5	2.2
K301205022-009	角度复合基台AC-RP-Φ4.8-GH4.5-30度-抗旋(加强型)	30	4.8	4.5	2.2
K301205022-010	角度复合基台AC-RP-Φ4.8-GH1.5-45度-抗旋(加强型)	45	4.8	1.5	2.2

- 包装单位：1*角度复合基台，1*辅助手柄
- 材料：医用钛合金
- 螺丝与基台分体型，分17°和30°
- 矫正就位道，桥架修复用
- 如果采用数字化预设方式修复，可提供对应的基台数据库
- 使用T5星型螺丝刀配合扭力扳手拧紧
- 建议拧紧扭矩：25~30 N.cm


复合基台保护帽

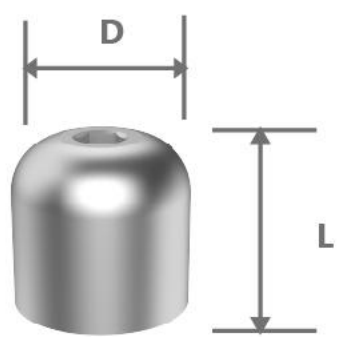

编码	产品描述	直径 D(mm)	高度 L(mm)
K301501022-001	复合基台保护帽NP/RP通用-Φ4.8-H4.1	4.8	4.1
K301501022-003	复合基台保护帽NP/RP通用-Φ4.8-H4.1-一体	4.8	4.1

- 包装单位：1*保护帽
- 材料：医用钛合金
- 暂时封堵复合基台二级接口螺丝孔，或复合基台水平牙龈成型
- 一体式，使用T5星型螺丝刀手动拧紧


复合基台钛基底

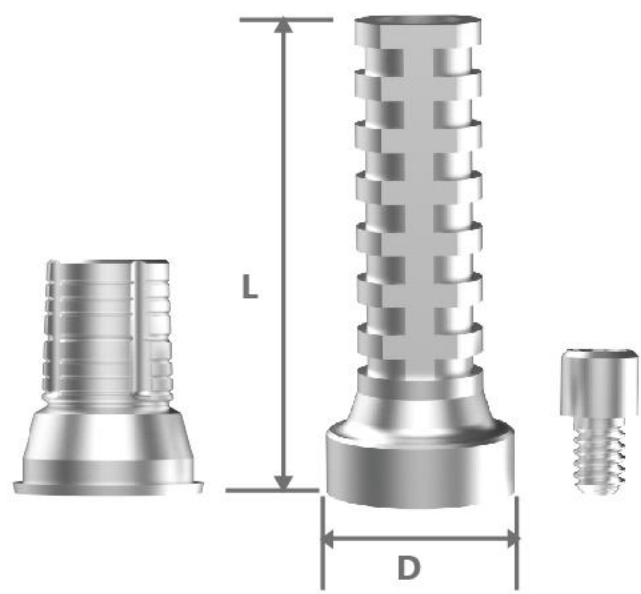

编码	产品描述	直径 D(mm)	高度 L(mm)
K301502022-001	复合基台钛基底NP/RP通用-Φ4.8	4.8	12.0
K301502022-003	数字化复合基台钛基底Φ4.8-L6	4.8	6.0

- 包装单位：1*临时基台，1*桥用螺丝
- 材料：医用钛合金
- 非抗接口，临时修复用
- 与桥用螺丝配套使用
- 分别对应2/4/6/8四个高度
- 分石膏和数字化两款，如果采用数字化预设方式修复，可提供对应的基台数据库
- 使用T5星型螺丝刀配合扭力扳手拧紧
- 建议拧紧扭矩：20 N.cm
- 适用于复合基台水平取模案例


复合基台开窗式转移杆

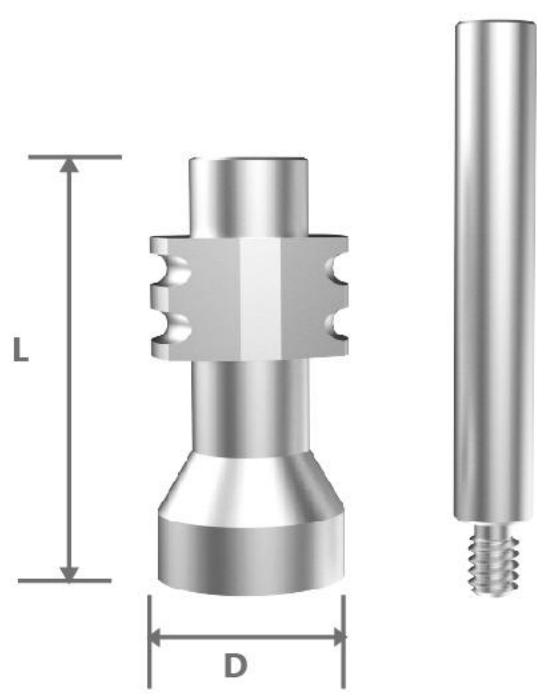

编码	产品描述	直径 D(mm)	高度 L(mm)
K301303022-001	复合基台开窗式转移杆NP/RP通用-Φ4.8	4.8	10.7

- 包装单位: 1 *开窗式转移杆 + 1 *转移杆螺丝
- 材料：医用钛合金
- 非抗，复合基台水平开窗式托盘取模用
- 搭配转移杆螺丝使用
- 使用T5星型螺丝刀，手动拧紧即可


复合基台闭合式转移杆

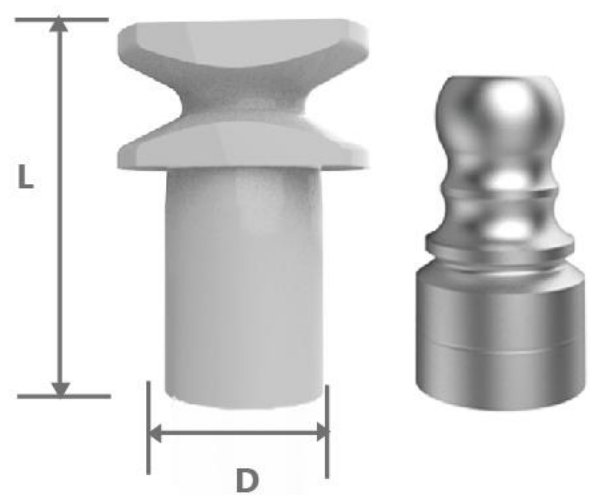

编码	产品描述	直径 D(mm)	高度 L(mm)
K301501022-002	复合基台闭口式转移杆NP/RP通用-Φ4.8-L8	4.8	8.0

- 包装单位：1*闭口式金属转移帽、1*塑料印模帽(单独采购)
- 材料：医用钛合金、医用塑料
- 非抗，复合基台水平闭口式取模用
- 两个搭配使用，用于即刻负重临时牙取模，不建议用于永久性修复取模


复合基台石膏替代体

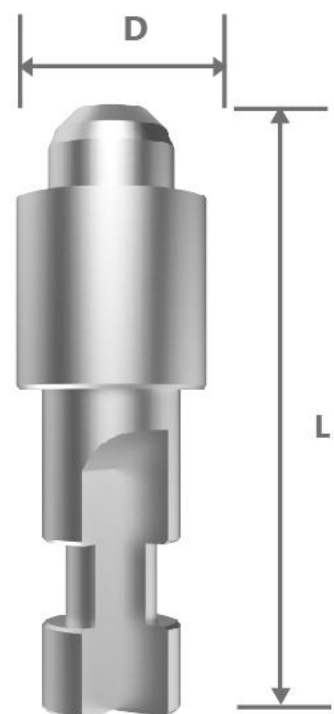

编码	产品描述	直径 D(mm)	高度 L(mm)
K301603021-001	复合基台石膏替代体AC-NP/RP通用-Φ4.8	4.8	15.0

- 包装单位: 1 *替代体
- 材料：医用钛合金/医用不锈钢
- 传统石膏倒模用，将口内的复合基台的位置重现在石膏技工模型上
- 复合基台水平取模通用款


复合基台打印替代体

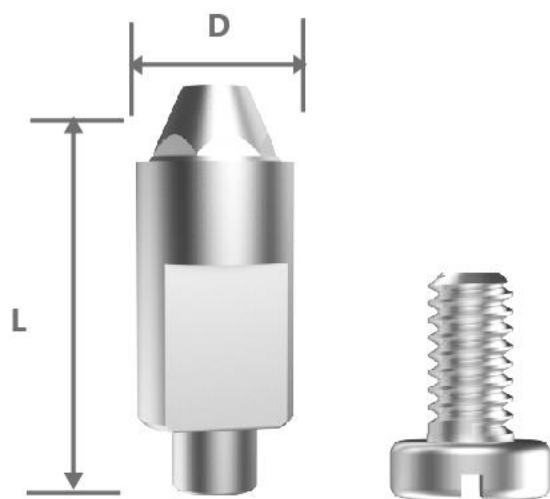

编码	产品描述	直径 D(mm)	高度 L(mm)
K301604022-001	复合基台打印替代体AC-NP/RP通用-Φ4.8	4.8	12.5

- 包装单位: 1 *替代体，1*替代体底部螺丝
- 材料：医用钛合金/医用不锈钢
- 口扫打印模型用，将口内的种植体重现在树脂技工模型上
- 复合基台水平取模、口扫通用款

复合基台扫描杆

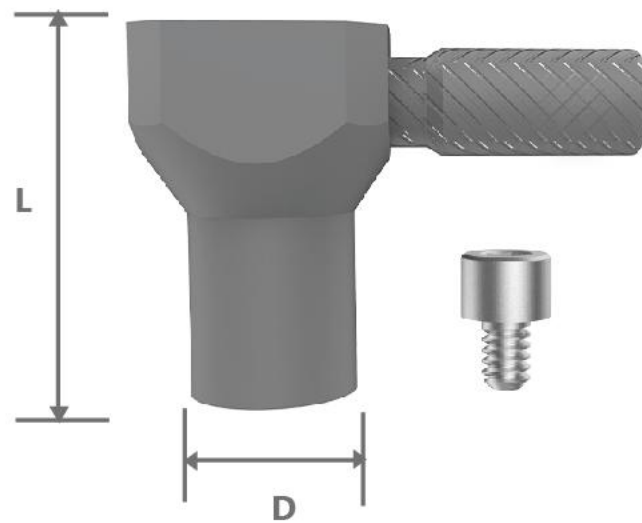

编码	产品描述	直径 D(mm)	高度 L(mm)
K301403018-001	复合基台扫描杆AT-Φ4.8	4.8	10.0

- 包装单位: 1 *扫描杆，1*桥用螺丝，1*识别杆
- 材料：医用钛合金
- 非抗，复合基台水平口扫用
- 搭配桥用螺丝使用
- 种植位相隔较近时，无需安装识别杆，相隔较远，需安装识别杆
- 使用口扫，需配套使用复合基台打印替代体